

TEST RESPIRATOIRE A L'UREE : HELICOBACTER PYLORI

But du test :

Contrôle de l'efficacité du traitement d'éradication.

Produit :

Héli-Kit® (urée 13C : 75 mg ; acide citrique : 1,4 g), Laboratoires Mayoly-Spindler.

Précautions : (voir ci-dessous «**DELAIS A RESPECTER AVANT LA REALISATION D'HELI-KIT**»)

- Arrêt, depuis au moins 4 semaines avant le test, de tout traitement antibiotique.
- Arrêt des anti-sécrétoires depuis 2 semaines (IPP, anti-H2, ...).
- Arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures.

Protocole :

- Sujet à jeun depuis la veille, au repos sans boire ni manger ni fumer pendant l'épreuve.
- Identifier clairement les 4 tubes de prélèvements (2 tubes T0 et 2 tubes T30) (tubes type Exetenair®, 10 ml uniquement).
- Dissoudre l'acide citrique du sachet du kit dans 200 ml d'eau.
- Faire ingérer au patient 100 ml de cette solution et conserver le reste.
- Ouvrir les deux tubes marqués T0 en dévissant le bouchon.
- Faire souffler doucement le patient dans l'un des deux tubes T0 à l'aide de la première paille. Faire souffler jusqu'à apparition de buée dans le tube. Retirer la paille tout en continuant à souffler puis reboucher rapidement le tube.
- Renouveler la même opération avec le deuxième tube T0.
- Dissoudre l'urée du sachet du kit dans le volume restant de la solution d'acide citrique (100 ml).
- Faire ingérer au patient la solution d'urée et déclencher le chronomètre.
- Faire attendre le patient 30 minutes.
- Ouvrir les deux tubes T30 en dévissant le bouchon.
- Faire souffler doucement le patient dans l'un des deux tubes T30 à l'aide de la deuxième paille. Faire souffler jusqu'à apparition de buée dans le tube.
- Retirer la paille tout en continuant à souffler puis reboucher rapidement le tube.
- Renouveler la même opération avec le deuxième tube T30.
- Vérifier l'étanchéité des tubes bouchés.
- Insérer les tubes dans le cartonnage prévu à cet effet et joindre le bon de demande dûment complété.
- Pour les correspondants du laboratoire, remettre le kit de transport complet à l'agent de collecte habituel pour un transport à température ambiante.

DELAIS A RESPECTER AVANT LA REALISATION D'HELI-KIT

Le test doit se pratiquer :

- 1 mois après l'arrêt de tout traitement antibiotique,
- 15 jours après l'arrêt des anti-sécrétoires :

IPP

- Inexium
- Lanzor
- Ogast
- Mopral
- Omeprazole
- Zoltum
- Eupantol
- Inipomp
- Pariet

Anti-H2

- Stomedine
- Tagamet
- Pepcidac
- Pepdine
- Nizaxid
- Azantac
- Raniplex
- Pepcidduo

Et aussi

- Cytotec
- Keal
- Ulcar

- 24 heures après l'arrêt des anti-acides et pansements gastro-intestinaux

- Digestif Marga
- Gelusil
- Isudrine
- Maalox
- Moxydar
- Phosphalugel
- Rennie
- Riopan
- Rocgel
- Xolaam
- Actapulgate
- Bedelix
- Smecta
- Bolinan
- Poly-Karaya
- Pepsane
- Polysilane
- Siligaz
- Acidrine
- Contracide
- Gastropulgite
- Gelox
- Kaomuth
- Mutésa
- Neutroses