



AVANT MISE SOUS DARATUMUMAB

Si patient possède déjà une carte de groupage sanguin :

Un prélèvement de 2 tubes EDTA à mettre dans pochette EFS pour :

- RAI Trypsine
- Phénotype étendu

Renseigner la pochette EFS (préciser la mise sous DARATUMUMAB et la date prévue de traitement)
et

sur pochette d'envoi extérieur (feuille jaune) du laboratoire de Mâcon, écrire en bas manuellement (RAI Trypsine + Phénotype étendu) avec l'indication que le patient va être mis sous DARATUMUMAB

Si patient ne possède pas de carte de groupage sanguin :

1/Premier prélèvement de 2 tubes EDTA à mettre dans pochette EFS pour :

- RAI Trypsine
- Phénotype étendu

Renseigner la pochette EFS (préciser la mise sous DARATUMUMAB et la date prévue de traitement)
et

sur pochette d'envoi extérieur du laboratoire de Mâcon, écrire en bas manuellement (RAI Trypsine + Phénotype étendu) avec l'indication que le patient va être mis sous DARATUMUMAB

2/Réaliser une carte de groupe au laboratoire du CH de mâcon (idem autre patient)

- **1** tube EDTA pour détermination N°1 avec bon de groupe à remplir et cocher sur bon blanc « groupe sanguin »
- Sur un autre prélèvement **1** tube EDTA pour détermination N°2 avec bon de groupe à remplir et cocher sur bon blanc « groupe sanguin »

APRES MISE SOUS DARATUMUMAB

En cas de demande de RAI :

Prélèvement de 3 tubes EDTA à mettre dans pochette EFS pour :

- RAI Trypsine

Renseigner la pochette EFS (préciser que le patient est sous DARATUMUMAB et la date de mise sous traitement)
et

sur pochette d'envoi extérieur du laboratoire de Mâcon, écrire en bas manuellement (RAI Trypsine avec l'indication que le patient est sous DARATUMUMAB)



Laboratoire
BIOLOGIE_MEDICALE
CH des Chanoux
Bd Louis Escande
71018 Mâcon Cedex

**PRELEVEMENT POUR PROTOCOLE
DARATUMUMAB**

Ref : C2-INST-036-V02(A)
Version : 02
Applicable le : 10-11-2017



DOCUMENT NON GERE DIFFUSION NON CONTROLEE