



AVANT MISE SOUS DARATUMUMAB

Si patient possède déjà une carte de groupage sanguin :

Un prélèvement de 3 tubes EDTA à mettre dans pochette EFS pour :

- RAI Trypsine
- Phénotype étendu

Renseigner la pochette EFS (préciser la mise sous DARATUMUMAB et la date prévue de traitement)
et

sur pochette d'envoi extérieur (feuille jaune) du laboratoire de Mâcon, **cocher en bas à droite au verso** :
RAI Trypsine Daratumumab + Phénotype étendu Daratumumab

Si patient ne possède pas de carte de groupage sanguin :

1/ Premier prélèvement de 3 tubes EDTA à mettre dans pochette EFS pour :

- RAI Trypsine
- Phénotype étendu

Renseigner la pochette EFS (préciser la mise sous DARATUMUMAB et la date prévue de traitement)
et

sur pochette d'envoi extérieur (feuille jaune) du laboratoire de Mâcon, **cocher en bas à droite au verso** :
RAI Trypsine Daratumumab + Phénotype étendu Daratumumab

2/ Réaliser une carte de groupe au laboratoire du CH de mâcon (idem autre patient)

- **1** tube EDTA pour détermination N°1 avec bon de groupe à remplir et cocher sur bon blanc « groupage sanguin »
- Sur un autre prélèvement **1** tube EDTA pour détermination N°2 avec bon de groupe à remplir et cocher sur bon blanc « groupage sanguin »

APRES MISE SOUS DARATUMUMAB

En cas de demande de RAI :

Prélèvement de 3 tubes EDTA à mettre dans pochette EFS pour :

- RAI Trypsine

Renseigner la pochette EFS (préciser que le patient est sous DARATUMUMAB et la date de mise sous traitement)
et

sur pochette d'envoi extérieur (feuille jaune) du laboratoire de Mâcon, **cocher en bas à droite au verso** :
RAI Trypsine Daratumumab



Laboratoire
BIOLOGIE_MEDICALE
CH des Chanoux
Bd Louis Escande
71018 Mâcon Cedex

**PRELEVEMENT POUR PROTOCOLE
DARATUMUMAB**

Ref : C2-INST-036-V03(A)
Version : 03
Applicable le : 19-03-2021



DOCUMENT NON GERE DIFFUSION NON CONTROLEE